

GREEN&CLEAN MB

Használati útmutató

200005320v01 | 2024-07



DENTAL USE




METASYS

protect what you need

HU – Használati útmutató

1. Fordítások

Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

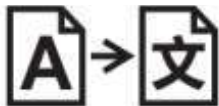

Tetras GmbH

Sirius Business Park, Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 Munich, Germany

Ábrák

A használati útmutatóban foglalt ábrák pusztán referenciaként szolgálnak, és adott esetben eltérhetnek a termék tényleges megjelenésétől.


1. Megjegyzések

1.1. Általános megjegyzések



DENTAL USE

Tárolási hőmérséklet:

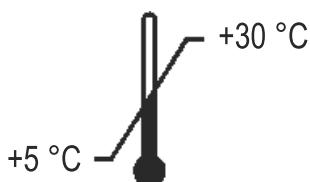

Termékazonosítók:

Laurilpiridinium-klorid (104-74-5)

Alkohol, C10-16, etoxilált, propoxilált (69227-22-1)

1.2. Az ikonok magyarázata

1	CE-jelölés	13	Viseljen szemvédőt
2	Orvostechikai eszköz	14	Információ
3	Cikkszám	15	Védje a forróságtól / védje a napsugárzástól
4	Tétel megjelölése	16	Védje a nedvességtől / tárolja száraz helyen
5	Lejárat dátum	17	A csomagnak ez a része nézzen felfelé
6	Gyártó	18	Rakásolás korlátozása
7	Tartsa be a használati útmutatót	19	Egészséget érintő veszély
8	Hőmérséklet korlátozása	20	Az orvostechikai eszköz egyedi azonosítója
9	Mennyiségi adat	21	UDI-jelölés a szabványnak megfelelő HIBC-adattartalommal
10	A meghatalmazott képviselő svájci székhelyének neve és címe		
11	A fordítás felelőse		
12	Viseljen védőkesztyűt		

1.3. Szerzői jogi megjegyzés

Az összes nevet és tartalmi elemet szerzői jog védi. A jelen dokumentum továbbadása, sokszorosítása vagy bármilyen más felhasználása csak a METASYS Medizintechnik GmbH írásos beleegyezésével megengedett.

2. Rendeltetés

A GREEN&CLEAN MB egy citromsav és enzim bázisú oldat, amely a fogászati kezelőegységek szájoöblítő csészéinek tisztítására és a nemkívánatos szagok elfedésére szolgál.

Javallat: Vér és nyál eltávolítása a szájoöblítő csészében.

Ellenjavallat: Nem alkalmazható.

Célcsoport: Szakképzett egészségügyi szak személyzet.

3. A biztonsággal kapcsolatos információk

3.1. A biztonsággal kapcsolatos általános információk

A termékkel összefüggésben bekövetkező valamennyi súlyosabb esetet jelenteni kell a gyártónak, illetve a felhasználó és/vagy a páciens lakóhelye vagy székhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

3.2. Veszélyre figyelmeztető és biztonsági utasítások

A keverék veszélyesnek minősül az 1272/2008/EK (CLP) rendelet értelmében.



- | | |
|-------------|--|
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz. |
| H411 | Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |
| P264 | A használatot követően a(z) alaposan meg kell mosni. |
| P270 | A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. |

FIGYELEM

3.3. Elsősegély-nyújtási intézkedések

Sürgősségi telefonszám: Toxikológiai segélyhívó szám, Munich +49 (0)89 19240

Elsősegély-nyújtási intézkedések:

Általános megjegyzések: A szennyezett, átitatott ruházatot azonnal le kell vetni.

Belégzés esetén: Légúti irritáció esetén forduljunk orvoshoz!

Bőrrel érintkezés esetén: Azonnal mossuk le vízzel és szappannal.

Szembe jutás esetén: Ha a termék a szembe került, a nyitott szemrést legkevesebb 5 percig kell bő vízzel kiöblíteni. Ezt követően szemorvossal konzultálni.

Lenyelés esetén: Azonnal öblítsük ki a sérült száját, majd itassunk vele bő mennyiségű vizet!

3.4. Egyéni védőeszközök

Szem-/Arcvédelem: Megfelelő szemvédelem: Szorosan zárt védőszemüveg. Javasolt szemvédő gyártmányok: DIN EN 165

Kézvédelem: Megfelelő anyag: NBR (nitril-kaucsuk). Védőkesztyű anyagának vastagsága: 0,4 mm. Javasolt

kesztyűgyártmányok: EN ISO 374. Kiegészítő kézvédelmi intézkedések: Lehetőség szerint pamut kesztyű használandó alöltözetként.

Légzésvédelem: Rendeltetésszerű használata esetén és rendes körülmények között nincs szükség légzésvédelemre.

4. Termékleírás

4.1. Termékleírás

A szájöblítő csészetisztító egy citromsav és enzim bázisú oldat, amely a fogászati kezelőegységek szájöblítő csészéinek tisztítására és a nemkívánatos szagok elfedésére szolgál.

4.2. Összetétel

Citromsav, kvaterner ammóniumvegyületek, nemionos tenzidek és enzimek

4.3. Hatóidő

A hatóidő attól függ, hogy a szájöblítő csésze mennyire szennyezett, azonban 30 másodpercnél nem lehet kevesebb.

5. Használat

5.1. Adagolás

A GREEN&CLEAN MB egy használatra kész oldat, amelyet nem kell hígítani.

5.2. Használat

Megjegyzés:

- > A GREEN&CLEAN MB-t hígítás nélkül kell alkalmazni!
- > alkalmazás közben egyéni védőeszközöket kell viselni!

22 Töltsön tisztítószeres oldatot az adagolópalackba. A kezelés megkönnyítésére használjon (PE vagy PP) tölcsejt.

23 A kefefejet az adagolóegységgel csavarja rá az adagolópalackra.

Használat:

24 Adagoláshoz állítsa fejjel lefelé az adagolópalackot (1-szer megnyomva azt).

25 Tisztítsa meg a szájöblítő csészét a kefe segítségével.

26 Majd a szennyeződések eltávolításához öblítse ki alaposan a szájöblítő csészét.

6. Gondozás és ápolás

6.1. Rendszeres tisztítási tevékenységek

Megjegyzés:

- > A kefefejet ultrahangos készülékben vagy műszerkádban rendszeres időközönként fertőtleníteni kell (autoklávozni tilos!)
- > A kefefejeket rendszeresen cserélje ki

Tisztítsa meg a kefefejet

- | | |
|----|---|
| 27 | A felhordópalack külső felületeit felületfertőtlenítő szerrel tisztítsa meg és fertőtlenítse. |
| 28 | Távolítsa el a kefefejet. Durva szennyeződés vagy elhasználódás esetén cserélje ki a kefefejet. |
| 29 | A kefefejet vízzel elő kell tisztítani, majd ultrahangos vagy műszerfürdőben fertőtleníteni. |

7. Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

A terméket a hatósági előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

	rendeltetésszerű használat előtt	rendeltetésszerű használat után
	Termék	Csomagolás
Termék hulladékjegyzék-kódja	70699	150102
veszélyes hulladék	Nem	Nem
Hulladék megnevezése	HULLADÉKOK M.N.N.	Műanyag csomagolás

8. Melléklet

8.1. Rendelési számok és szállítási terjedelem

Rendelési szám	Megnevezés
122000035	GREEN&CLEAN MB Start, 1 x 180 ml adagolópalack kefével
122000032	GREEN&CLEAN MB bevezetőkészlet, 2 x 500 ml + 2 adagolópalack + 2 kefe
122000033	GREEN&CLEAN MB 1. utántöltő készlet, 4 x 500 ml + 4 kefe
122000034	GREEN&CLEAN MB 2. utántöltő készlet, 4 x 500 ml
122000037	GREEN&CLEAN MB pótkefék, 4 darab
121000020	GREEN&CLEAN MB pót-adagolópalack, Adagolópalack kefével, üres

8.2. Módosítási előzmények

Felülvizsgálat	Dátum	Leírás
200005320	22.06.2021	Újjonnan létrehozva.
200005320v01	16.09.2024	1.3 fejezet angol részének javítása, elütés a 4.7 fejezetben; REF- és rendelési számok javítása. Új rendelési számok.

A nyomtatási és szedési hibák jogát fenntartjuk!